

Instruções de Uso

Somente para uso diagnóstico *in vitro*

AFIAS Washing Cartridge

USO PRETENDIDO

AFIAS Washing Cartridge é destinado para uso na limpeza do adaptador de ponteiros (tip) no Sistema **AFIAS 6**.

COMPONENTES

AFIAS Washing Cartridge consiste em 'suporte de cartucho AFIAS', 'tubos DDW', 'Tubos de Detergente', E 'Instruções de Uso'.

O tubo DDW é preenchido com água deionizada pré dispensada e selado.

O tubo Detergente é preenchido com Tween 20 a 0,2% e selado com lacre de alumínio

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIAS

- Uso somente em diagnóstico *in vitro*.
- Leia atentamente e siga as instruções de uso.
- Este produto não deve ser utilizado após a data de validade.
- **Recomendamos que esse procedimento seja feito a cada 120 testes ou pelo menos 1 vez por semana, a fim de evitar falhas no equipamento.**
- Caso o procedimento não seja realizado pelo menos em uma periodicidade semanal, resultados incorretos podem ocorrer.
- Apenas para uso com o Sistema AFIAS-6.
- **Não realize nenhum teste até 30 minutos após a realização do procedimento de lavagem.**



MATERIAIS FORNECIDOS

- Componentes do kit **AFIAS Washing Cartridge**:
 - Suporte de Cartucho AFIAS: 5
 - Tubo DDW: 100
 - Tubo Detergente: 100
 - Instrução de uso: 1

CONFIGURAÇÃO DO TESTE

- Verifique o conteúdo do **AFIAS Washing Cartridge**: 'Suporte de Cartuchos AFIAS', 'Tubos DDW', 'Tubos Detergente', e 'Instruções de uso'.
- O suporte de Cartucho AFIAS é reutilizável, a menos que haja contaminação.

※ **Verifique cuidadosamente a cor de cada tubo antes de utilizar o kit no procedimento de lavagem.**

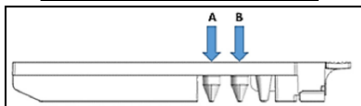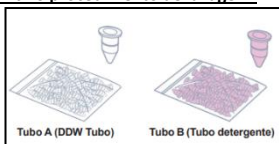

- ① Posicione o suporte de cartucho AFIAS em uma superfície plana.
- ② Insira um tubo A (Branco - DDW) na posição A.
- ③ Insira um tubo B (Rosa - Detergente) na posição B.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Condições de Armazenamento	
Temperatura	15-30°C
Estabilidade	60 meses
Nota	Descartável

INSTRUÇÕES DE USO

- ① Vá em 'Manutenção' no menu principal do equipamento.
- ② Clique em 'Lavagem do Adaptador de Tip'
- ③ Insira o cartucho preparado no primeiro canal da Baía A.
- ④ Clique em 'Iniciar (START)'
- ⑤ A lavagem será feita em 3 minutos.
- ⑥ Destaque os tubos A e B utilizados do suporte de cassete e descarte de maneira apropriada.

GARANTIA

Esta instrução de uso deve ser lida atentamente antes da utilização do produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do teste não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções. No caso de danos nas embalagens, contate a [BioSys Ltda.](#)

DESCARTE

Seguir as disposições da resolução sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes.

Observação: Favor consultar a tabela abaixo para identificar os diversos símbolos:

	Consulte as instruções de uso
	Validade
	Lote
	Catálogo
	Cuidado, consulte documentos anexos
	Fabricante
	Representante autorizado da Comunidade Europeia
	Diagnóstico <i>in vitro</i>
	Limites de temperatura
	Não reutilizar
	Este produto cumpre as exigências da Diretiva 98/79/CE relativa aos dispositivos médicos para diagnóstico <i>in vitro</i>

Instruções de Uso

Somente para uso diagnóstico *in vitro*

AFIAS Washing Cartridge



Boditech Med Incorporated  

43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon,

Chuncheon-si, Gang-won-do

Republic of Korea

Tel: +(82) -33-243-1400

Fax: +(82) -33-243-9373

www.boditech.co.kr

Fabricado por: Boditech Med Incorporated

Importado e Distribuído por: BioSys Ltda

Rua Coronel Gomes Machado, 358, Centro, Niterói, RJ Cep:

24020-112

CNPJ: 02.220.795/0001-79

MS –nº 10350840350

SAC: sac@biosys.com.br-(21) 3907-2534 / 0800 015 1414

www.biosys.com.br