

## Instruções de Uso

Somente para uso diagnóstico in vitro

### Solução de Preenchimento Interno ( Internal Filling Solution )

REF 2492

**MS 80115310236**



**ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, VERIFIQUE O NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE USO E A VERSÃO CORRESPONDENTE NA EMBALAGEM DO MESMO.**

PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE USO EM FORMATO IMPRESSO, SEM CUSTO ADICIONAL, CONTATAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: SAC (21) 3907-2534 / 0800 015 1414 / [sac@kovalent.com.br](mailto:sac@kovalent.com.br)

### USO PRETENDIDO

A Solução de Preenchimento Interno EasyLyte é usada para preencher o compartimento do eletrodo.

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

A Solução de Preenchimento Interno EasyLyte deve ser armazenada em local fresco e seco. A temperatura de armazenamento deve estar entre 4 e 25°C.

### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Cloreto de Potássio

Agente umectante

### APRESENTAÇÃO

Frasco com 125 mL

### PRECAUÇÕES E AVISOS

A Solução de Preenchimento Interno EasyLyte não contém nenhum ingrediente ativo, portanto, não existem precauções a serem tomadas.

### PREPARAÇÃO

Remova a tampa do frasco da solução de preenchimento interno. Remova ou perfure o lacre vermelho. Posicione o bico no frasco. Remova o tampão de preenchimento do compartimento dos eletrodos. Preencha o compartimento dos eletrodos pelo orifício de preenchimento até que a solução de preenchimento interna atinja a linha de preenchimento na janela. Recoloque o tampão de preenchimento.

### PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade da Solução de Preenchimento Interno EasyLyte é de 18 meses.

### GARANTIA

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as informações nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

## Instruções de Uso

Somente para uso diagnóstico in vitro

---

### Símbolos Usados

	Fabricante
	Limites de temperatura
	Diagnóstico in vitro
	Cuidado, consulte documentos anexos
	Consulte instruções de uso
	Material Reciclável
	Não rejeitar diretamente para o ambiente
	Lote
	Data de Fabricação
	Validade
	Risco Biológico
	Altamente tóxico
	Corrosivo
	Nocivo

### FABRICADO POR

#### Medica Corporation

5 Oak Park Drive  
Bedford, Massachusetts 01730-1413 USA  
Tel 781 275 4892  
Fax 781 275 2731  
[www.mediacorp.com](http://www.mediacorp.com)

### IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

#### Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jd. Bom Retiro  
São Gonçalo – RJ – CEP 24722-414 - Brasil  
[www.kovalent.com.br](http://www.kovalent.com.br)  
CNPJ: 04.842.199/0001-56  
Farm. Resp.: Jorge A. Janoni  
CRF: 2648-RJ

SAC: [sac@kovalent.com.br](mailto:sac@kovalent.com.br) – (21) 3907-2534 / 0800 015 1414

Data de vencimento e nº de lote: VIDE RÓTULO