

## SYSTEM CHECK SOLUTION MASSCHROM STEROID PANEL 2

(Solução de verificação do sistema – Painel 2)

MS 10350840356

Para teste de adequação do sistema pelo método LC-MS/MS antes de iniciar as análises:

**Somente para uso diagnóstico *in vitro*.**

**Nº de lote, data de fabricação e validade:** vide rótulos dos frascos e da embalagem.

Artigo	Apresentação
72099	1 x 1 mL (liof.)

### Instruções

- O sistema LC-MS/MS deve ser equilibrado por 10 minutos utilizando as condições iniciais (veja o manual de instruções 72072 "Steroids in plasma/serum").
- Injetar o System Check Solution Steroid Panel 1 (artigo n. 72099) repetidamente até que dois cromatogramas sucessivos apresentem tempos de retenção e intensidades de sinal idênticos (veja o manual de instruções 72072 "Steroids in plasma/serum" para informações adicionais).
- Iniciar a análise

### Condições de Armazenamento

Armazenado abaixo de -18°C, o System Check Solution é estável até a data de validade presente no rótulo do produto.

### Especificações

Variações de  $\pm 1\%$  no peso de cada frasco

### Comentário

A tabela a seguir contém os analitos do System Check Solution Steroid Panel 2

Os valores dos analitos variam lote a lote e são informados na bula em inglês que acompanha o produto.

Analitos
Androstenediona
Dehidroepiandrosterona (DHEA)
Sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEAS)
11- Desoxicorticosterona
Dehidrotestosterona
Estradiol
17 $\alpha$ -hidroxiprogesterona
Progesterona
Testosterona

### Garantia

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

### Descarte

Seguir as disposições da resolução sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes, revisão em vigor.

### Símbolos Usados



Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH  
Am Heng 12 · 82166 Gerfeling/Alpenrhe  
Phone: +49 89 18930-0 · Fax: +49 89 18930-199  
mailto:info@chromsystems.com · www.chromsystems.com

Importado e Distribuído por: Biosys Ltd.  
Coronel Gomes Machado, 358, Centro, Miriti, RJ  
CEP: 24020-112 · CNPJ: 02220795/0001-79 · SAC: (21) 3907-2534  
src@biosys.com.br · www.biosys.com.br