

CONTROLE DE ASO

CONTROL DE ASO

MS 80115310080

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Nº de pedido. Presentación
4060002KC 2 x 1 mL

FINALIDAD

Control de precisión para la determinación inmunoquímica cuantitativa de ASO en orina por turbidimetría y nefelometría.

COMPOSICIÓN

Dilución de suero humano en tampón fosfato salino, que contiene un alto nivel de ASO. El control es líquido y estabilizado.
Conservante: azida de sodio (0.095%).
Listo para usar.

PREPARACIÓN Y ESTABILIDAD

Control de líquidos, listo para usar.
La fecha de caducidad del producto almacenado entre 2 - 8°C se indica en la etiqueta.
Una vez abierto, el frasco se puede utilizar durante 6 semanas si está bien cerrado y se almacena entre 2 - 8°C.
No congelar.

CUIDADOS Y PRECAUCIONES

1. Solo para uso diagnóstico *in vitro*.
2. Tenga el cuidado necesario al manipular los reactivos de laboratorio.
3. Cada donante utilizado para la preparación de estándares y controles fue analizado y los resultados fueron negativos para la presencia de anticuerpos VIH1 y VIH2, así como antígenos de superficie de hepatitis B y anticuerpos antihepatitis C, utilizando métodos aprobados por la FDA. En la fabricación solo se utilizaron donantes con resultados negativos. Sin embargo, todos los productos obtenidos de fluidos corporales humanos deben manipularse con el cuidado adecuado de acuerdo con los procedimientos recomendados para materiales biológicamente peligrosos, ya que no se puede probar la ausencia de agentes infecciosos.
4. Los reactivos que contienen azida sódica deben manipularse con cuidado. No ingerir ni evitar el contacto con la piel y las membranas mucosas. La azida de sodio puede formar compuestos explosivos en contacto con metales pesados como el plomo o el cobre.

GARANTÍA

Estas instrucciones de uso deben leerse detenidamente antes de usar el producto y la información contenida en ellas debe cumplirse estrictamente. La confiabilidad de los resultados de la prueba no se puede garantizar en caso de desviación de las instrucciones.

MANIPULACIÓN DE DESECHOS

Obsérvese la normativa legal al respecto.

MATERIALES REQUERIDOS PERO NO SUMINISTRADOS

1. Reactivo para la determinación del parámetro marcado.
2. Equipo general de laboratorio

PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA

Hay disponibles a petición aplicaciones para sistemas automáticos.

Utilice el control como si fuera una muestra, siguiendo el procedimiento descrito en las instrucciones de uso del Kit.
Consulte el prospecto del paquete del kit de reactivos ASO para obtener instrucciones de uso.

VALORES FIRMADOS

El valor de concentración de analito de este control es específico y válido solo para el lote correspondiente y se indica en la tabla de valores para cada lote involucrado. Los valores se basaron en la estandarización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Siemens.

* Cada laboratorio debe establecer acciones correctivas en caso de desviaciones en el control de recuperación.

** Los cambios en el valor del analito definido en este control pueden ocurrir debido a la re-estandarización del material de referencia.

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

Símbolos utilizados

| | |
|---|---|
|  | Fabricante |
|  | Límite de temperatura |
|  | Producto sanitario para diagnóstico <i>in vitro</i> |
|  | Precaución |
|  | Consultar instrucciones de uso |
|  | Material reciclable |
|  | No tirar directamente al medio ambiente |
|  | Código de lote |
|  | Fecha de fabricación |
|  | Validez |
|  | Peligros biológicos |
|  | Altamente tóxico |
|  | Corrosivo |
|  | Dañino |

FABRICANTE

Kovalent do Brasil Ltda.
Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jd. Bom Retiro
São Gonçalo – RJ – CEP 24722-414 - Brasil
www.kovalent.com.br
CNPJ: 04.842.199/0001-56

Fecha de caducidad y Cód. de Lote: CONSULTAR EL RÓTULO