

System Check Solution - MassChrom® Amino Acid Analysis (Solução de verificação do sistema – Análise de aminoácidos)

MS 10350840419

Somente para uso diagnóstico in vitro.

Nº de lote, data de fabricação e validade: vide rótulos dos frascos e da embalagem.

Artigo	Apresentação
75010	1 x 1 mL

Finalidade

System Check Solution - MassChrom® Amino Acid Analysis é designado para adequação do sistema LC-MS/MS antes de iniciar as análises

Procedimento

- O sistema LC-MS/MS deve ser equilibrado por 5 minutos utilizando as condições iniciais (veja as Instruções de Uso do produto 75111 "MassChrom® Análise de Aminoácidos em plasma/soro").
- Injetar o System Check Solution (artigo 75010) repetidamente até que dois cromatogramas sucessivos apresentem tempos de retenção e intensidades de sinal idênticos (veja as Instruções de Uso do produto 75111 "MassChrom® Análise de Aminoácidos em plasma/soro" para informações adicionais).
- Iniciar a análise.

Condições de Armazenamento

Armazenado abaixo de -18°C, System Check Solution é estável até a data de validade indicada no rótulo do produto.

Importante

O armazenamento a baixas temperaturas pode resultar na separação de fases da solução. **Portanto, misture bem a solução antes de usar.**

Especificações

Variação máxima frasco a frasco: 1% no peso.

Garantia

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

Descarte

Seguir as disposições da resolução sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes, revisão em vigor.

Composição








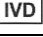




Acetonitrila, contendo as substâncias relacionadas.
Conservante: 2-metil-2H-isotiazol-3-one

A tabela contendo as substâncias do System Check Solution - MassChrom® Amino Acid Analysis é informada na bula em inglês que acompanha o produto.

Como para alguns analitos é usado o mesmo MRM, alguns padrões internos são adicionados para facilitar a identificação inequívoca dessas substâncias.

As substâncias indicadas com asterisco na tabela são apenas para avaliação de separações críticas. Elas não devem ser usadas para avaliação do desempenho do sistema (nem comparação entre corridas nem de lote-a-lote).

Símbolos utilizados:

	Fabricante
	Número de catálogo
	Quantidade suficiente para <n> ensaios
	Código do lote
	Validade
	Limite de temperatura
	Consultar as instruções para utilização
	Produto para a saúde para diagnóstico <i>in vitro</i>
	Cuidado
	Atenção
	Perigo
	Este produto cumpre as exigências da Diretiva 98/79/CE relativa aos dispositivos médicos para diagnóstico <i>in vitro</i>



Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH
Am Hoeg 12 · 82164 Gröbiling / Alemanha
Phone: +49 89 18930-0 · Fax: +49 89 18930-199
mailto:info@chromsystems.com · www.chromsystems.com

Importado e Distribuído por: Biosys Ltd.
Coronel Gomes Medeiros, 358, Centro, Niterói, RJ
CEP: 24020-112 · CNPJ: 022202795/0001-79 · SAC: (21) 3907-2334
src@biosys.com.br · www.biosys.com.br