

## MYKOV CD80



ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, VERIFIQUE O NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE USO E A VERSÃO CORRESPONDENTE NA EMBALAGEM DO MESMO.

PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE USO EM FORMATO IMPRESSO, SEM CUSTO ADICIONAL, CONTATAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: SAC (21) 3907 2534 / 0800 015 1414 / [sac@kovalent.com.br](mailto:sac@kovalent.com.br)

## APRESENTAÇÃO

Artigo nº	Apresentação
5191000K	1 x 1000 mL

## FINALIDADE

Solução para a limpeza de amostras e sondas de reagentes, misturadores e cuvetes de analisadores químicos.

## SUMÁRIO

MyKov CD80 é um agente de limpeza líquido alcalino concentrado, biodegradável e isento de fosfatos, contendo tensoativos. É eficaz para remover proteínas, lipídeos, íons e outros resíduos de reações químicas em superfícies de Amostras e Sondas de Reagentes, Misturadores e Cuvetes dos Analisadores Químicos.

## COMPOSIÇÃO

MyKov CD80 é um agente alcalino com 2% de Hidróxido de Potássio, sal dissódico di-hidratado EDTA e tensoativos.

## ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

A solução é estável até o prazo da data de validade no frasco fechado à temperatura de 2°C a 35°C.

Uma vez aberto para uso, o MyKov CD80 mantém-se estável durante 3 meses quando o ambiente operacional está entre 2°C e 35°C.

## ADVERTÊNCIAS

1. O produto contém Hidróxido de Potássio, que é um alcalino.
2. Contém irritante grave para os olhos e irritante suave para a pele. Utilize luvas de proteção de látex e proteção para os olhos, ao manusear.
3. Para uso profissional em laboratório.
4. Não inale e/ou ingira. Em caso de inalação ou ingestão, procure imediatamente a ajuda de um médico.
5. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato, lave imediatamente a área afetada com bastante água e consulte o médico, se necessário.

## CUIDADOS E PRECAUÇÕES

1. Não utilize o produto para além da data de validade e da data de utilização.
2. Não misturar os reagentes novos com os reagentes em utilização.
3. Evitar a formação de espuma.
4. Confirmar a integridade da embalagem antes da sua utilização. Não utilizar o MyKov CD80 quando a embalagem estiver danificada.
5. Se a embalagem for aberta involuntariamente antes de ser utilizada, conserve o MyKov CD80 bem fechado entre 2°C e 35°C; a estabilidade será igual à estabilidade em utilização.
6. Se o produto tiver sido congelado ou transportado a alta temperatura, deixe-o atingir a temperatura ambiente e agite-o antes de utilizar.
7. Por favor, consulte a ficha de segurança e tome as precauções necessárias para o manuseio de reagentes de laboratório.
8. Eliminar o produto residual, o produto não utilizado e as embalagens contaminadas de acordo com as diretrizes locais ou

nacionais para a eliminação de resíduos biologicamente perigosos.

9. A capacidade de limpeza e compatibilidade dos materiais do MyKov CD80 deve ser verificada antes da sua aplicação a a outros dispositivos médicos.
10. O desempenho do MyKov CD80 é influenciado pela data de expiração, poluição do ar ou mistura com outros reagentes.
11. Todos os riscos identificados foram reduzidos tanto quanto possível sem afetar negativamente a relação benefício/risco, e o risco residual global é aceitável.
12. Qualquer acidente grave ocorrido em associação com o dispositivo deverá ser comunicado ao fabricante e à autoridade sanitária competente do local onde estiver estabelecido o usuário e/ou doente.
13. Este produto contém componentes classificados da seguinte forma, de acordo com ABNT NBR 14725:2023:



## Perigo

H314: Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves

## Prevenção

P260: Não inale poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis.

P264: Lave a mão cuidadosamente após o manuseio.

P280: Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial/proteção auricular.

## Resposta:

P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: Enxague a boca. NÃO provoque vômito.

P303+P361+P353: EM CASO DE CONTACTO COM A PELE (OU O CABELO): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água [ou tome uma ducha].

P305+P351+P338: EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso do uso de lentes de contacto, remova-as se for fácil. Continue enxaguando.

P310: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

P363: Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.

## Eliminação:

P501: Descarte o conteúdo/recipiente num centro autorizado de recolha de resíduos perigosos ou especiais de acordo com os regulamentos locais.

## GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

Seguir as disposições da resolução em vigor que dispõe sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde bem como outras práticas de biossegurança equivalentes.

## PREPARO DA SOLUÇÃO

MyKov CD80 deve ser utilizado entre 2°C e 35°C.

Agite antes de utilizar.

O uso desta solução deve ser de acordo com o especificado no manual do fabricante do equipamento.

Para MyKov 600M: Não diluir. Pronto para uso.

Para MyKov 200, MyKov Lite, MyKov Plus, MyKov 240, MyKov 360, MyKov 450: Diluir na proporção 1:10.

Para maiores informações, entre em contato com o SAC.














## MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS

1. Equipamento geral de laboratório.

## GARANTIA

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

## INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

	Fabricante
	Limite de temperatura
	Cuidado
	Consultar as instruções para utilização
	Material reciclável
	Não rejeitar diretamente para o ambiente
	Código do lote
	Data de fabricação
	Validade
	Riscos biológicos
	Altamente tóxico
	Corrosivo
	Nocivo

## FABRICANTE

Kovalent do Brasil Ltda.  
 Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jd. Bom Retiro  
 São Gonçalo – RJ – CEP 24722-414 - Brasil  
[www.kovalent.com.br](http://www.kovalent.com.br)  
 CNPJ: 04.842.199/0001-56

Apresentação comercializada sob demanda:

2 x 2000 mL

SAC: [sac@kovalent.com.br](mailto:sac@kovalent.com.br) - (21) 3907-2534 / 0800 105 1414

Data de vencimento e nº de Lote: **VIDE RÓTULO**