

TOPKAL ZINCO

TOPKAL ZINC

Anvisa 80115310247



ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, VERIFICAR EL NÚMERO DE INSTRUCCIONES DE USO Y LA VERSIÓN CORRESPONDIENTE EN EL EMBALAJE.

PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES DE USO EN FORMATO IMPRESO, SIN COSTO ADICIONAL, CONTACTE CON EL SERVICIO AL CLIENTE: SAC (21) 3907 2534 / 0800 015 1414 / sac@kovalent.com.br

PRESENTACIÓN

N° de pedido	Presentación
1190003KC	1 x 3 mL

FINALIDAD

Calibrador utilizado en determinaciones cuantitativas *in vitro* de la concentración de Zinc (Zn) en sistemas fotométricos.

RESUMEN

TopKal Zinco es un calibrador líquido estable (basado en plasma humano).

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Los frascos cerrados o abiertos de TopKal Zinco deben almacenarse entre 15–25 °C.

ESTABILIDAD

El frasco cerrado es estable hasta el final del mes indicado en la fecha de vencimiento del kit. El frasco una vez abierto es estable por hasta 70 días. Se deben observar el almacenamiento y la manipulación adecuados de este producto.

CUIDADOS Y PRECAUCIONES

Cada donante de sangre individual utilizado para la producción de TopKal Zinco fue no reactivo cuando se analizó mediante métodos aprobados para HBsAg, anti-HIV 1+2 y anti-HCV. Sin embargo, dado que no es posible excluir definitivamente que los productos derivados de sangre humana transmitan agentes infecciosos, se recomienda que el calibrador sea manipulado con los mismos cuidados utilizados para las muestras de pacientes. Este producto contiene Azida Sódica (0,95 g/L) como conservante. ¡No ingerir! Evitar el contacto con la piel y las membranas mucosas.

PREPARACIÓN

TopKal Zinco es líquido y está listo para usar.

PROCEDIMIENTO

Por favor, consulte el inserto del reactivo para Zinc para obtener las instrucciones de uso.

MANIPULACIÓN DE DESECHOS

Cumplir con lo dispuesto en la resolución vigente que establece la normativa técnica para el manejo de los residuos de servicios de salud, así como otras prácticas de bioseguridad equivalentes.

GARANTÍA

Estas instrucciones de uso deben leerse atentamente antes de utilizar el producto y deben respetarse estrictamente las indicaciones contenidas en ellas. No puede garantizarse la fiabilidad de los resultados de las pruebas en caso de desviación de las instrucciones.

VALORES DEL CALIBRADOR

Los valores asignados a TopKal Zinc se determinaron de acuerdo con la metodología de Absorción Atómica.

*Cada laboratorio debe establecer acciones correctivas en caso de desviaciones en la recuperación del calibrador.

** Pueden ocurrir cambios en el valor del analito definido en este calibrador debido a la reestandarización del material de referencia.

LITERATURA

1. Fairbanks VF, Klee GG. Biochemical aspects of hematology. In: Burtis CA, Ashwood ER, editores. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3° ed. Filadelfia: W.B Saunders Company; 1999. p. 1642-1710.
2. Wick M, Pingerra W, Lehmann P. Clinical aspects and laboratory. Iron metabolism, anemias. 5° ed. Wien, Nova lorque: Springer; 2003.
3. Dati F, Schumann G, Thomas L, Aguzzi F, Baudner S, Bienvenu J et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996; 34: 517-20.
4. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1° ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 273-5.

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

Símbolos utilizados

	Fabricante
	Límite de temperatura
	Producto sanitario para diagnóstico <i>in vitro</i>
	Precaución
	Consultar instrucciones de uso
	Material reciclable
	No tirar directamente al medio ambiente
	Código de lote
	Fecha de fabricación
	Validez
	Peligros biológicos
	Altamente tóxico
	Corrosivo
	Dañino

FABRICANTE:

Kovalent do Brasil Ltda.
Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jd. Bom Retiro
São Gonçalo – RJ – CEP 24722-414 - Brasil
www.kovalent.com.br
CNPJ: 04.842.199/0001-56

SAC: sac@kovalent.com.br - (21) 3907-2534 / 0800 015 1414

Fecha de caducidad y Cód. de Lote: CONSULTAR EL RÓTULO

	VALORES DE CALIBRACIÓN
TOPKAL ZINCO	200 µg/dL
	30,6 µmol/L