

SOLUÇÃO HEMOLISANTE

SOLUCIÓN HEMOLIZANTE

Anvisa 80115310147



ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, VERIFICAR EL NÚMERO DE INSTRUCCIONES DE USO Y LA VERSIÓN CORRESPONDIENTE EN EL EMBALAJE.

PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES DE USO EN FORMATO IMPRESO, SIN COSTO ADICIONAL, CONTACTE CON EL SERVICIO AL CLIENTE: SAC (21) 3907 2534 / 0800 015 1414 / sac@kovalent.com.br

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Nº de pedido	Presentación
4190500K	1 x 500 mL

FINALIDAD

Solución Hemolizante para la determinación cuantitativa *in vitro* de hemoglobina A1c (HbA1c) en sangre entera en sistemas fotométricos.

RESUMEN

La Solución Hemolizante se utiliza para la preparación de muestras de sangre total, calibradores y controles para la determinación de HbA1c con el kit HbA1c Kovalent.

COMPOSICIÓN DEL REACTIVO

Agua
Estabilizador

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

El reactivo se mantiene estable hasta el final del mes indicado en la fecha de caducidad, siempre que se almacene a una temperatura de entre 2 y 25 °C y se evite la contaminación. No congele el reactivo.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Observar todas las medidas de precaución necesarias para la manipulación de reactivos de laboratorio.

PREPARACIÓN DE REACTIVO

El reactivo está listo para usar

PREPARACIÓN DE MUESTRAS

Solución Hemolizante	1000 µL
Muestra/Calibrador/Control	20 µL

Mezclar y dejar reposar durante 5 minutos o hasta que se observe una hemólisis completa.

MANIPULACIÓN DE DESECHOS

Cumplir con lo dispuesto en la resolución vigente que establece la normativa técnica para el manejo de los residuos de servicios de salud, así como otras prácticas de bioseguridad equivalentes.

GARANTÍA

Estas instrucciones de uso deben leerse detenidamente antes de usar el producto y la información contenida en ellas debe cumplirse estrictamente. La confiabilidad de los resultados de la prueba no se puede garantizar en caso de desviación de las instrucciones.

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

Símbolos utilizados

	Fabricante
	Límite de temperatura
	Producto sanitario para diagnóstico <i>in vitro</i>
	Precaución
	Consultar instrucciones de uso
	Material reciclable
	No tirar directamente al medio ambiente
	Código de lote
	Fecha de fabricación
	Validez
	Peligros biológicos
	Altamente toxico
	Corrosivo
	Dañino

FABRICANTE

Kovalent do Brasil Ltda.
Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jd. Bom Retiro
São Gonçalo – RJ – CEP 24722-414 - Brasil
www.kovalent.com.br
CNPJ: 04.842.199/0001-56

SAC: sac@kovalent.com.br - (21) 3907-2534 / 0800 015 1414

Fecha de caducidad y Cód. de Lote: CONSULTAR EL RÓTULO